



# ORIMED

+48 502 274 647

+48 25 685 71 25

[orimed@orimed.pl](mailto:orimed@orimed.pl)

## ORIJECT ORI-720-004 - strzykawka do znieczulenia śródwięzadłowego

### Instrukcja użytkowania

#### Budowa strzykawki

Strzykawka składa się z:

- tulei wyposażonej we wziernik, która służy do założenia naboju ze środkiem znieczulającym oraz gwintowanej dyszy, na którą nakłada się igłę,
- uchwyty z dźwignią dozującą, tłoczka dozującego oraz przycisku zwalniającego tłoczek.

*Części te są połączone złączem bagnetowym.*

#### Przygotowanie

Przekręcając złącze bagnetowe należy rozmontować strzykawkę. Aby przesunąć tłok do pozycji wyjściowej, należy nacisnąć przycisk zwalniający i przytrzymać strzykawkę w pozycji pionowej (złączem bagnetowym do góry).

Umieścić nabój ze środkiem znieczulającym w tulei i ponownie połączyć obie części strzykawki za pomocą złącza bagnetowego. Naciskać dźwignię dozującą, aż wyczuwalny będzie delikatny opór. W tej pozycji dźwignia dozująca dochodzi do zamknięcia naboju ze środkiem znieczulającym i ustala nabój w tulei.

Włożyć igłę jednorazowego użytku do dyszy i nakręcić.

Naciskać dźwignię dozującą do momentu, gdy roztwór środka znieczulającego dotrze do ostrza igły. Strzykawka jest gotowa do użycia.

**UWAGA** - zawsze w pierwszej kolejności umieszczamy ampułkę ze znieczuleniem, a następnie nakręcamy igłę. Odwrócenie kolejności tych czynności w strzykawkach, które posiadają gwint pod kątem spowoduje uszkodzenie igły.

#### Obsługa strzykawki ORI-JECT 720-004

Każde naciśnięcie dźwigni dozującej powoduje podanie 0,06 ml środka znieczulającego. Zwykle dla **każdego korzenia** wymagane jest od 0,15 ml do 0,20 ml środka znieczulającego. Jedno naciśnięcie dźwigni dozującej powinno trwać ok. 7 sekund.

#### Czyszczenie i sterylizacja

**Ze względu na złożoną budowę (wiele punktów styecznych) należy zadbać o bardzo staranne wysuszenie części strzykawki przed jej pakietowaniem i sterylizacją w autoklawie. Należy się stosować do załączonej instrukcji sterylizacji.**

#### GWARANCJA

Strzykawka objęta jest 24 miesięczną gwarancją.